



اهورا صنعت سازان پارسین

طراح و تولید کننده انواع تجهیزات پزشکی **MIG**




ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم

Wood's Lamp

معاینه پوست از فاصله نزدیک



Packing information	
Color box width	23cm
Color box depth	5/5cm
Color box height	37cm
Total packed weight	1/6kg
Product information	
Assembled width	1/5 cm
Assembled depth	3/3cm
Assembled height	27cm
Assembled weight	1kg
Main colors	Silver& black
Light output information	
Light source type	UV CFL
Number of bulbs	2
Total wattage	18W
Input voltage	AC 100-240V
Magnifier information	
Main lens size	9CM
Main lens magnification	5x
S/N 1108MP14001-Item code M3301	

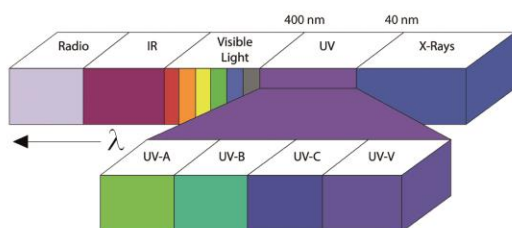

Woods' Lamp

وود لامپ، لامپی قابل حمل و برای معاینه و بررسی‌های تخصصی بوده که فیزیک‌دان آمریکایی رابرت وود خالق آن است. او موفق به تولید نور UV مشکی در پیک طول موج ۳۶۰nm گردید.

این دستگاه با تابش اشعه ماوراءبنفش نوع A با طول موج بین ۳۴۰-۴۵۰nm بر روی پوست به تشخیص زود هنگام تغییرات در بیماری‌های رنگدانه‌ای و افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم پوستی کمک می‌کند.

این دستگاه به راحتی امکان تشخیص ویتیلیگو، کراتوز، آکنه، ضخامت، وضعیت رطوبت، خشکی و قارچ بیش از حد پوست را فراهم می‌کند.

قابلیت‌ها:

- دارا بودن لنز نوری دایره‌ای عرضی ۹۰mm با قابلیت بزرگنمایی ۵x برای مشاهده همه جزئیات

- دارا بودن دو تیوب سیاه 9w-UV برای معاینه سطوح کوچک و تشخیص و شناسایی جزئیات کلی

- دارا بودن دستگیره ارگونومیک برای کاربری و دسترسی راحت به سوئیچ ON/OFF و وجود دستگیره پارچه‌ای مشکی همراه دستگاه که انجام معاینه را آسانتر می‌کند.

- استفاده از فناوری خاص برای کارکرد طولانی‌تر و راحت‌تر

- دارای یک سال گارانتی طلایی شرکت اهورا پارسیان و هشت سال خدمات پس از فروش

در هنگام استفاده از این دستگاه رنگ اشیاء و موارد مختلف به رنگ مشخص در می‌آید که به وضوح قابل شناسایی است.

- پوست سالم و بدون عارضه به رنگ آبی دیده می‌شود.

- آکنه و پوست چرب به رنگ نارنجی دیده می‌شود.

پورفیریها (ناهنجاری‌های ناشی از اختلال در تولید هموگلوبین) به رنگ صورتی دیده می‌شود.

- سلول‌های پوستی مرده به صورت نقاط سفید دیده می‌شود.

- پوست حساس نازک و پوست دهیدراته (آب از دست داده) به رنگ بنفش روشن دیده می‌شود.

- پیگمان‌های پوست تخریب شده و در اثر نور خورشید به رنگ نقطه‌های قهوه‌ای دیده می‌شود.

- ضایعات غیر التهابی آکنه به رنگ زرد روشن دیده می‌شود.

- ضایعات ناشی از قارچ‌های سطحی پسوریازیس و رسیکالر و مالاسزیا فورفور به رنگ سفید مایل به زرد یا نارنجی مسی دیده می‌شود.

- گونه‌های پاتوژن از باکتری سودوموناس فلورسانس سبز رنگ هستند.

- اریتراسمای ناشی از کورینه باکتریوم مینوتیسیموم به رنگ قرمز دیده می‌شود.

- ویتیلیگو یا لک و پیس ناشی از تخریب ملانوسیت‌ها با وضوح زیادی نمایان می‌شوند.

- کرم‌ها (لوسیون) به رنگ آبی روشن دیده می‌شود.

- افزایش بی‌رویه پورفیری‌های دندان، ادرار، مدفوع و ترشحات تاول به رنگ صورتی پررنگ دیده می‌شود.